

Master Up
Your Beauty in a
Most Natural Way Ever

HIFU Shower®
RESEARCH SOCIETY



リフティング、タイトニング、ボディライン、スキンリジュビネーション
ハイフシャワー®シリーズのご案内




ハイフ治療が選ばれる理由



顔の引き上げ
リフトアップ



顔の引き締め
肌質改善
シワ改善

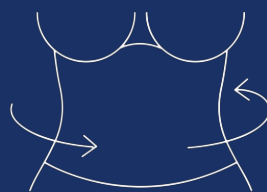

ボディラインを整える



切らない



最先端HIFU



コラーゲン産生



持続力

表皮を傷つけずにあらゆるニーズに対応

ハイフ治療のしくみ

HIFU(ハイフ)とは、
高密度焦点式超音波を意味する英語
「**H**igh **I**ntensity **F**ocused **U**ltrasound」
の略です。


ハイフの原理

人間の耳では聞こえない高い振動数をもつ超音波を1点に
集めて照射する方法です。

虫眼鏡で太陽光を1点に集中させると黒い紙が
焦げる現象と同じように、狙う部位に超音波を
集中照射することで高温になり熱が発生します。

超音波による熱エネルギーを
使用して、短時間で肌のリフト
アップやしわ・たるみの改善、
体の部分的な引き締め等の効果
が期待できる施術です。
「**切らないリフトアップ**」
として注目されています。






ハイフは、虫眼鏡で太陽光を1点に集中させると
黒紙が焦げるように、超音波を1点に集めて照射する方法。

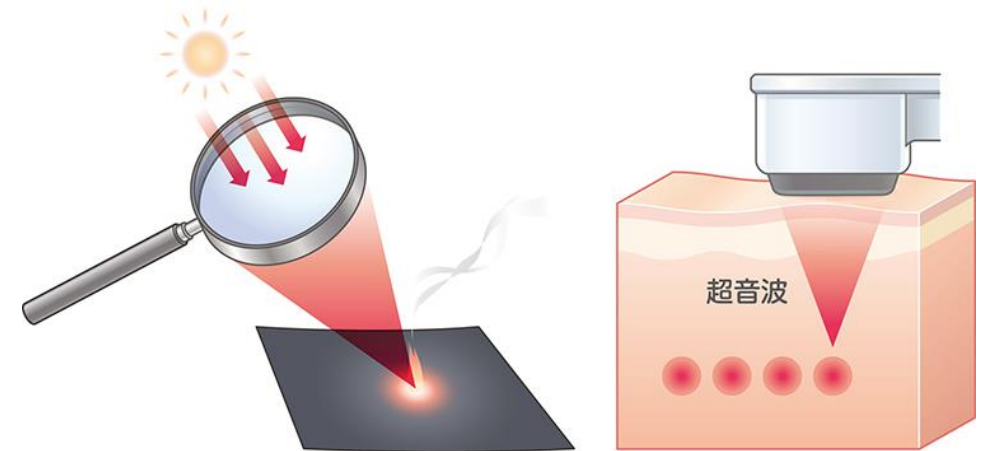

他の治療機器との違い

リフティング、タイトニング、ボディライン用の治療機器には様々な機械があり、機械の種類によってダウンタイム、副作用、効果が異なります。

ハイフは表皮を傷つけず、ダウンタイムがほぼないのが大きなメリットです。

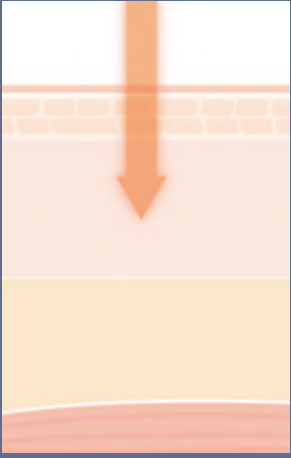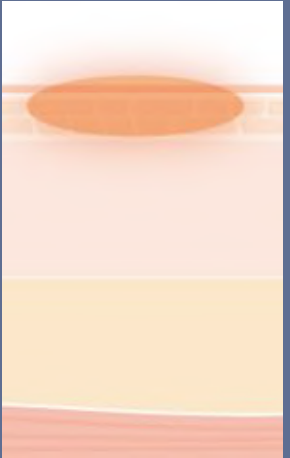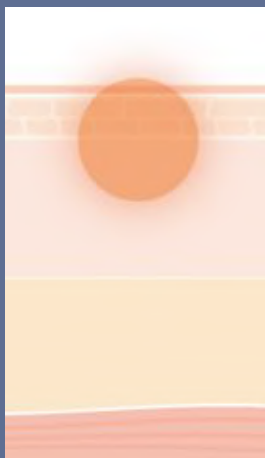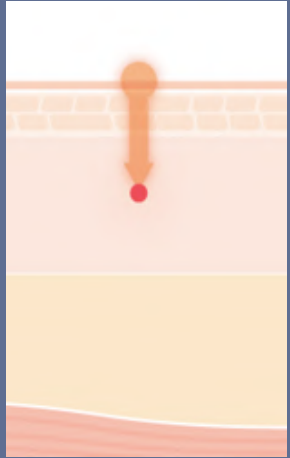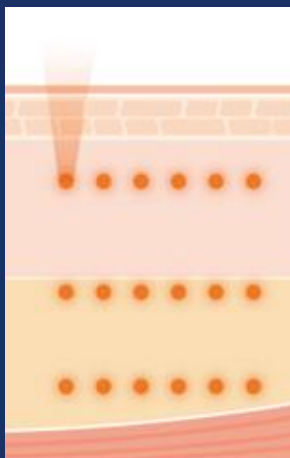	レーザー (CO ₂)	光 (IPL)	ラジオ波 (RF)	RFニードル	ハイフ
表皮					
真皮					
皮下組織					
筋					
	<ul style="list-style-type: none">• ダウンタイムあり• 痛み、出血あり• 表皮へのダメージあり• PIHの可能性あり	<ul style="list-style-type: none">• ダウンタイムあり• 痛み、赤み• 表皮へのダメージあり• PIHの可能性あり	<ul style="list-style-type: none">• ダウンタイムほぼなし• 熱感あり• 表皮へのダメージはほぼなし	<ul style="list-style-type: none">• ダウンタイムあり• 軽度の痛み• 出血あり• 表皮にダメージあり	<ul style="list-style-type: none">• ダウンタイムはほぼなし• 表皮へのダメージ無し• 一定の深さに均一なエネルギーで加熱


進化したウルトラフォーマー

痛み軽減 施術スピードアップ

点状と線状
2つの照射モードでもっと効果的に

点状照射

線状照射

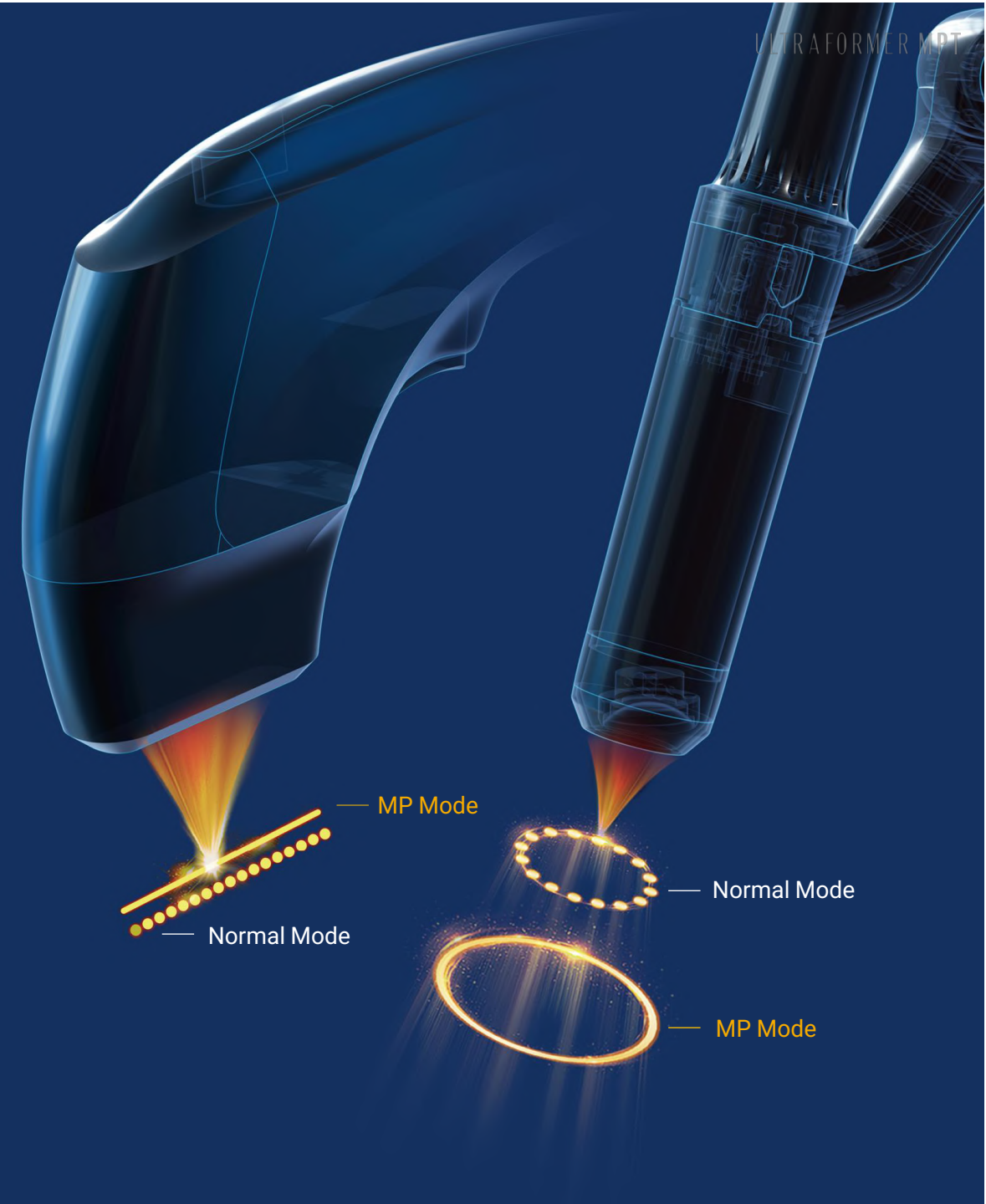

10種類の カートリッジで 様々な層にアプローチ

ハイフシャワー®、
ハイフアイシャワー®、
ハイフディープシャワー®
ハイフブースター®

Facial lifting & Skin tightening

1.5mm ————— 2.0mm



3.0mm ————— 4.5mm



Body Contouring (脂肪溶解)

6.0mm ————— 9.0mm ————— 13.0mm




ハイフブースター®

ハイフしながら美白も

PDRN

繊維芽細胞の活性
抗酸化作用
リジュビネーション

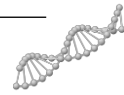


アデノシン

抗炎症作用
細胞賦活作用




ナイアシンアミド

バリア機能修復
保湿

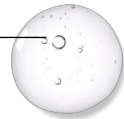

グルタチオン
美白

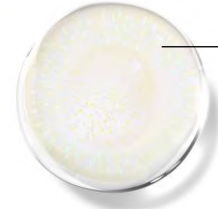

ツボクサエキス

抗炎症作用
抗菌





7 Hyaluronic acids / 10 Multi-peptides / 17 Amino acids

プロセス

特許取得済みのカプセル法MenbranceEmulsification

テクノロジーはさまざまな成分の活動を維持。


化粧品、一般化学、高精度医療用ビーズの製造に用いられる
特許取得済みのカプセル製造方法です。

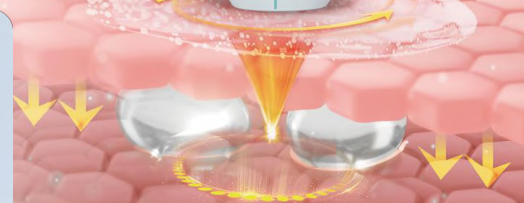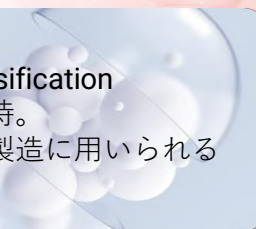

ハイフシャワー®、ハイファイシャワー®、ハイフブースター®による創傷治癒


照射

ハイフ照射を開始します。
65°C~75°Cの熱ダメージを与えます。
*照射の深さはカートリッジによって異なります。

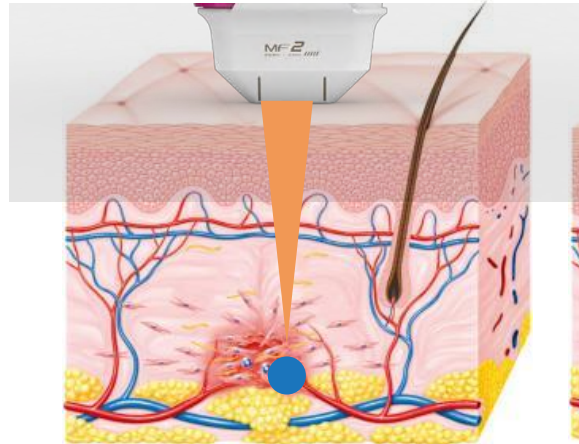


凝固炎症期

0~48時間
熱ダメージで、コラーゲンが縮み始めます。

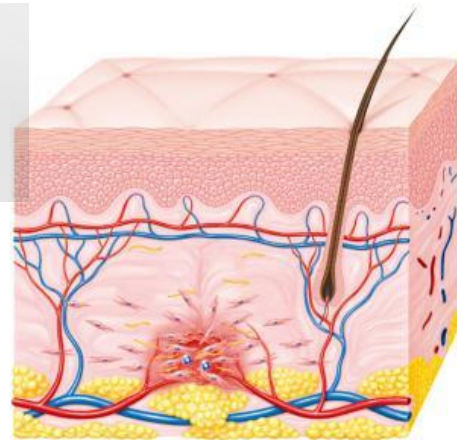


増殖期

2日~2週間
熱ダメージで縮んだコラーゲンを回復しようとする働きが起こります。新しいコラーゲンが生み出されます。

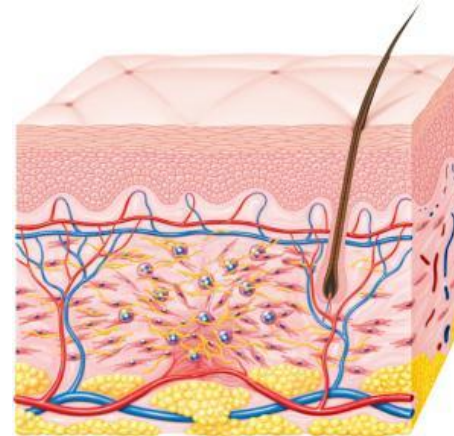

成熟期

3週間後
コラーゲンが産生され、肌にハリとツヤが生まれ、シワが軽減されます。

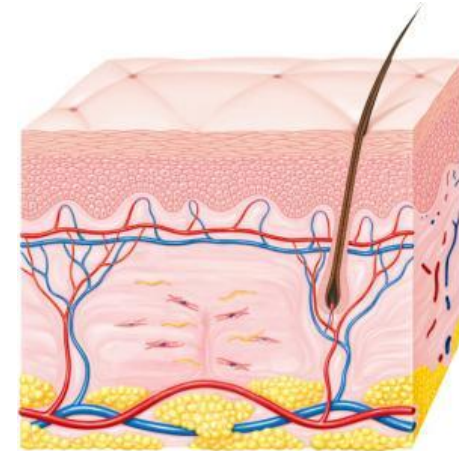


-  線維芽細胞
-  筋線維芽細胞
-  細胞
-  コラーゲン

肌の真皮層では時間の経過とともに自然にコラーゲンの合成量が減少していきます。

真皮層に照射をして熱ダメージを受けた部位から創傷治癒 (Wound Healing)作用が開始されます。

ハイフディーブシャワー®による脂肪溶解

頑固な脂肪細胞は燃やすことが難しいケースが多いですが、ハイフディーブシャワー®では、65℃~75℃の熱を与えて脂肪細胞を溶解します。脂肪だけに熱がフォーカスするため痛みがほとんどありません。

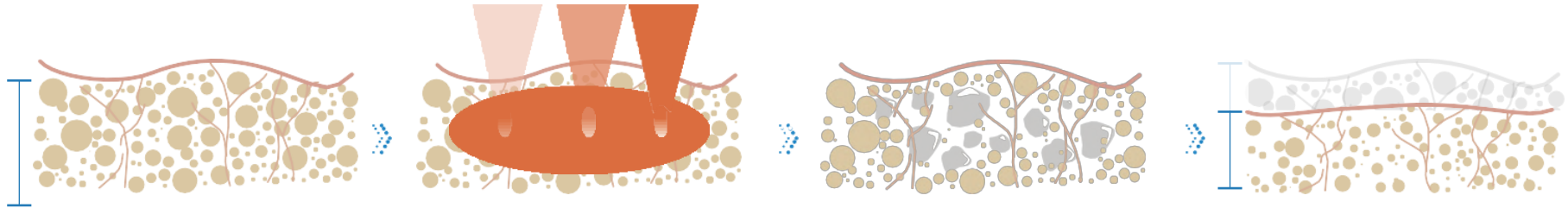


脂肪細胞が体内に蓄積されます。

熱エネルギーを集中して照射することで脂肪溶解が始まります。

溶解した脂肪細胞は、1~3カ月ほどかけて体外に排出されます。

結果、脂肪細胞が減り、メリハリのあるしなやかなボディラインになります。

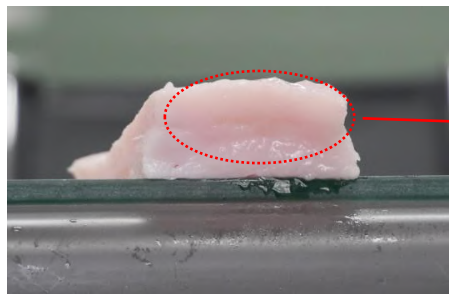


強力なハイフエネルギーが脂肪層へ浸透し、脂肪細胞を溶かします。




効果の実感まで・・・

効果的な熱エネルギーにより直後よりタイトニングが見られることもありますが、経時的にコラーゲンが産生されることでさらに高い効果が見えてきます。


施術直後⇒タイトニング

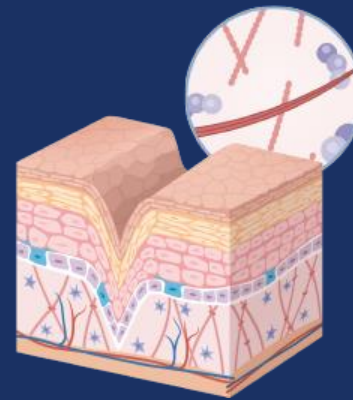

コラーゲンの産生の開始

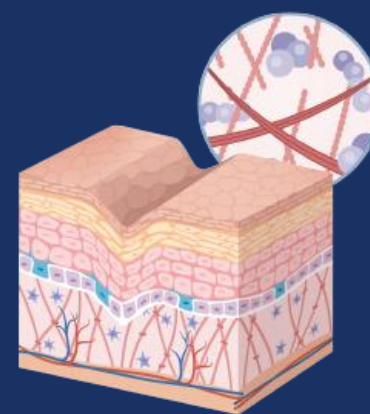

3～4週間以降、
更に高い効果へ

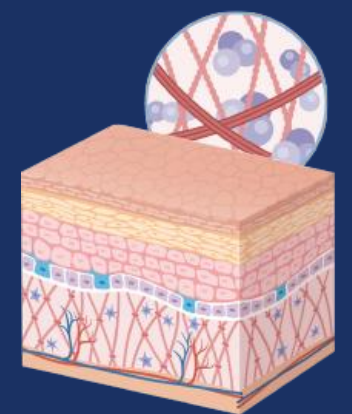

- 全顔の効果はおよそ半年程 (2mm、3mm、4.5mm使用)
- ハイフシャワー®は1～1.5ヵ月程 (2mmまたは1.5mm使用)

施術の流れ

1 診察・カウンセリング
診察を行います。骨格や肉付き、脂肪の厚さを確認し、個人にあわせた治療方針を決定していきます。


2 クレンジング・洗顔や着替え
顔施術の場合、洗顔して肌を清潔な状態にします。体施術の場合は専用の施術着に着替えます。

3 施術
施術同意書を確認し、不明な点があればクリニックにご質問ください。

* 施術までの2週間以内はIPL、レーザー、ヒアルロン酸、ボトックスや脂肪溶解剤の注入等は控えてください。
施術部位の皮膚状態によっては施術を行えない場合があります。
詳細は医師にお問い合わせください。

カウンセリングで決定した範囲にマーキング、ジェルを塗布して照射する深さ・エネルギーの強さ・照射回数を調整しながら照射していきます。

4 終了
ジェルなどを拭き取って施術は終了です。
施術後いつもどおりのお化粧をすることが可能です。
保湿と紫外線対策をしてください。

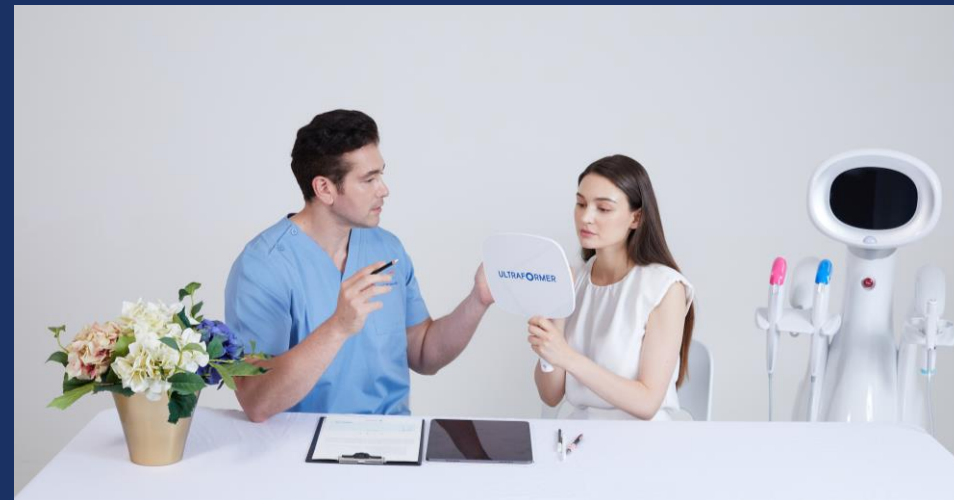



施術時間

顔

全顔 * 1.5mm～4.5mmカートリッジ使用時
20～30分

ハイファイシャワー® 目元周辺のみ
5～10分

ハイファイシャワー® * 2mmカートリッジ使用時
約10分

体

部分痩身 お腹（全体）
約60分

部分痩身 二の腕
約20分

設定によって施術時間が異なります。



Q & A

・ どういう方が受けられますか？

頬のたるみが気になる方、小顔になりたい方（タイトニング）、部分的なシワが気になる方にお勧めです。また、一定の脂肪がある方は脂肪除去モード（痩身）の対象です。

・ ダウンタイムはありますか？

個人差があります。稀に赤みや浮腫みが生じることがありますが、表皮を傷つけないので治療直後からメイクが可能です。

・ 効果はどれくらいで見られますか？

治療直後よりタイトニングを実感できる場合もありますが、コラーゲンの産生により、経時的に効果が見られます。個人差がありますが、およそ2ヵ月以降により効果が見られます。

・ 効果はどれ位続きますか？

全顔の施術では半年程、ハイフシャワーでは1.5ヵ月程が目安です。

・ 施術後の肌状態を教えてください

施術直後の熱感による赤みや浮腫みが一般的です。個人差があり、部分的に鈍痛やピリつきを伴う場合もありますが、数日程で治まります。



禁忌となる患者様

- 心臓疾患のある方
- ペースメーカー、植え込み型除細動器
- シリコン、インプラントまたは吸収性インプラント、金の糸(金属プレート)を埋め込んでいる方
- 妊娠中、または妊娠の可能性のある方、授乳中の方
- ケロイド体質の方
- 発熱中の方
- 治療部位に感染症や重度の皮膚疾患がある方(開放性の傷、重度のニキビ)、出血性の疾患

副作用・ダウンタイムについて

ダウンタイム


ほとんどなく、施術後すぐに通常の生活に戻ることができます。施術直後からお化粧も可能です。

起こり得る副作用は下記です。


- 紅斑：数時間～数日で治まります。
- 浮腫：数日で治まります。
- 鈍痛：数日～1週間で治まります。身体は数日～1ヵ月程かかることもあります。
- 内出血(経時的な点状出血を含む)：3週間程で治まります。
- ミミズ腫れ：1週間～2週間で治まります。
- 痺れ：数日～数週間ほどで治まります。
- 知覚鈍麻：最大3ヵ月程度で治まります。
- しこり（拘縮）

症例


目周り

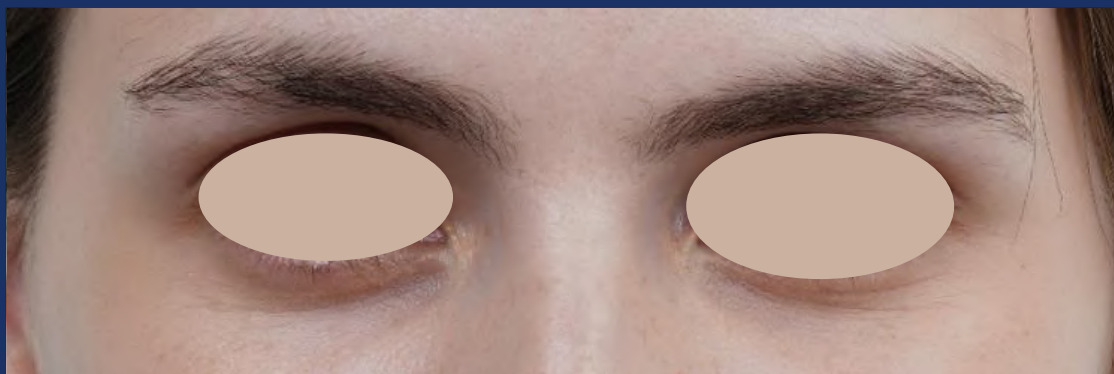

治療前

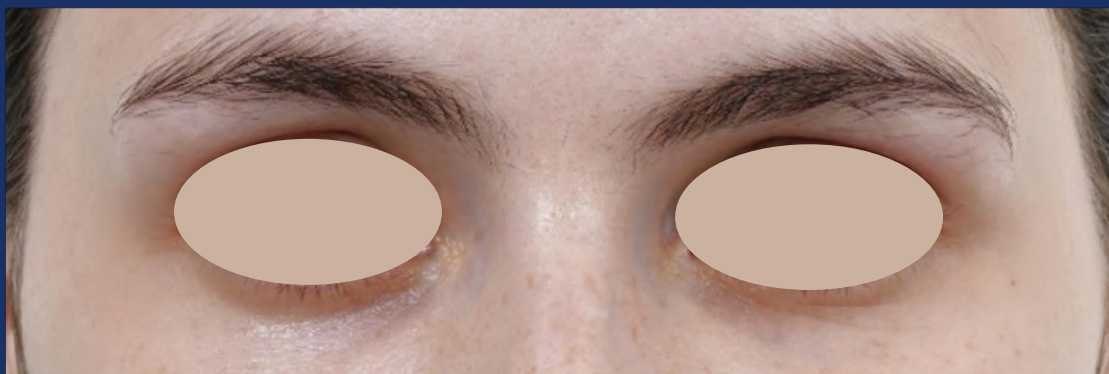

4週間後

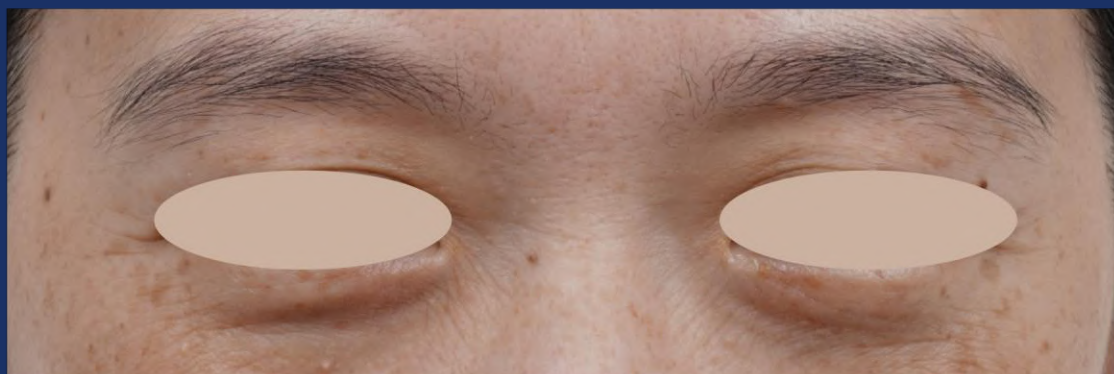

治療前



4週間後 (2セッション)

症例


全顔



治療前



4週間後 (2セッション)

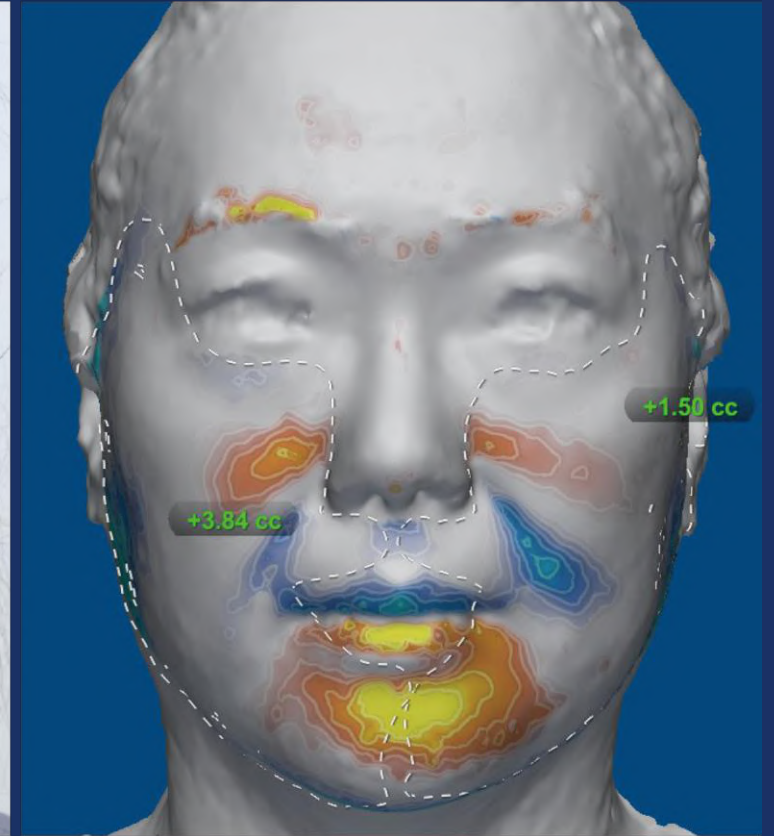

症例

ほうれい線周り



治療前



3週間後(1セッション)

症例

マリオネットライン




治療前




2週間後(2セッション)

症例


二重顎

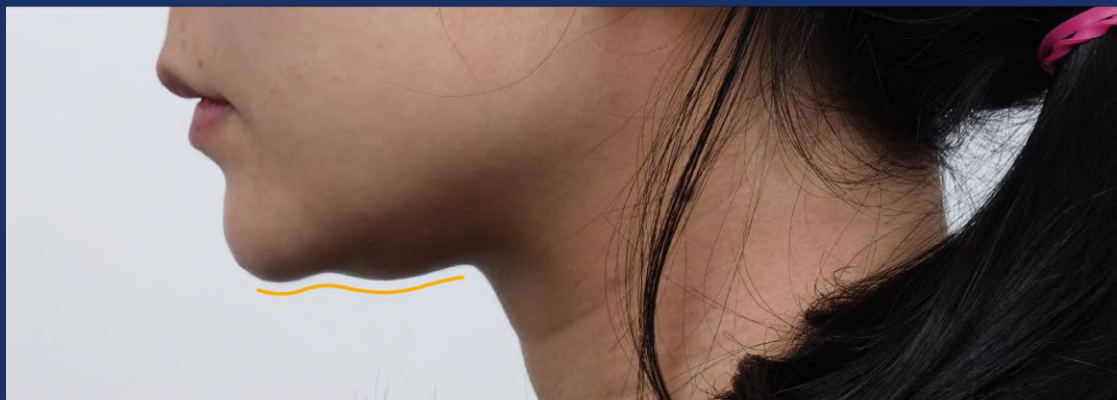


治療前

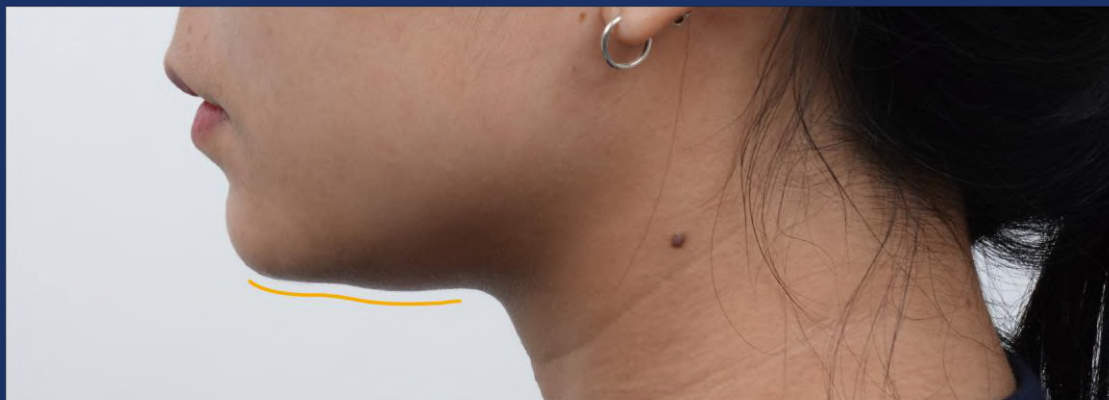

2週間後 (3セッション)

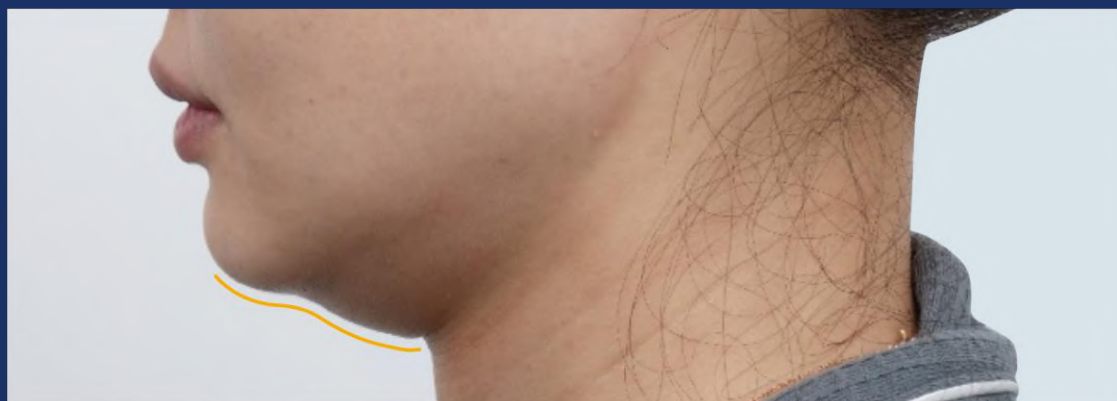

治療前

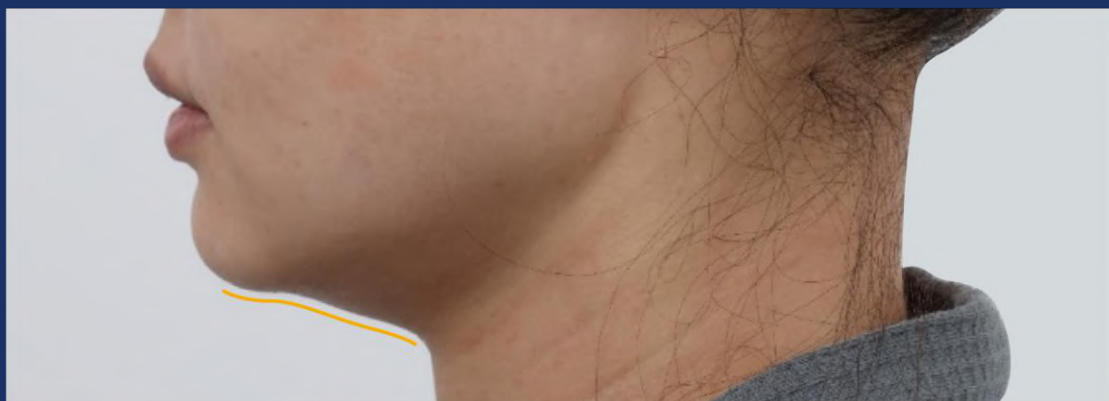


2週間後 (4セッション)

症例

脇の下



治療前

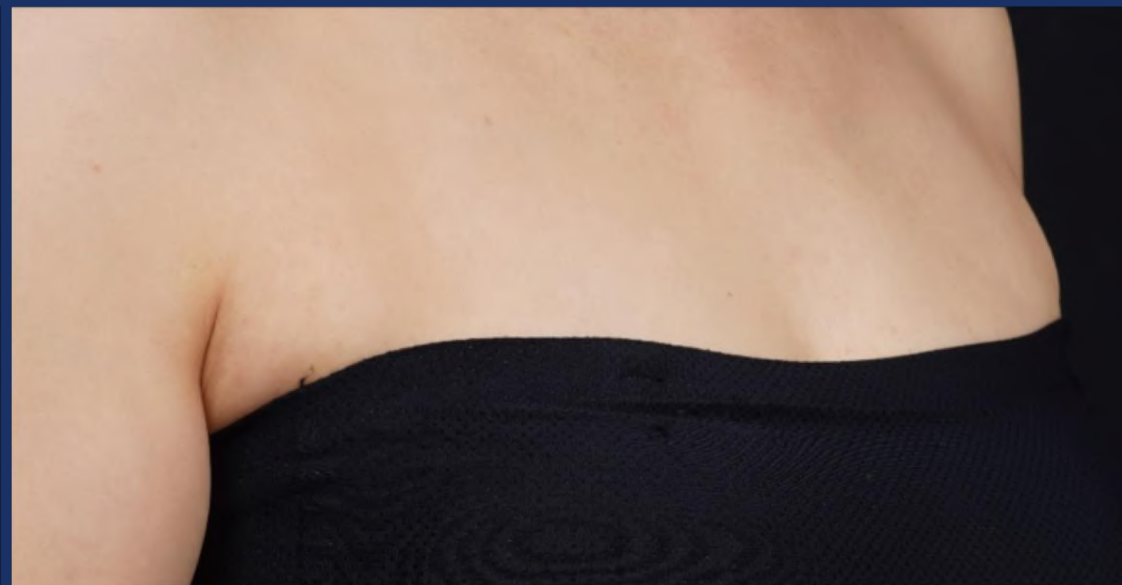

2週間後(3セッション)

症例

お腹



治療前



2週間後(2セッション)

症例

お腹



治療前




2週間後 (2セッション)

症例

膝上



治療前

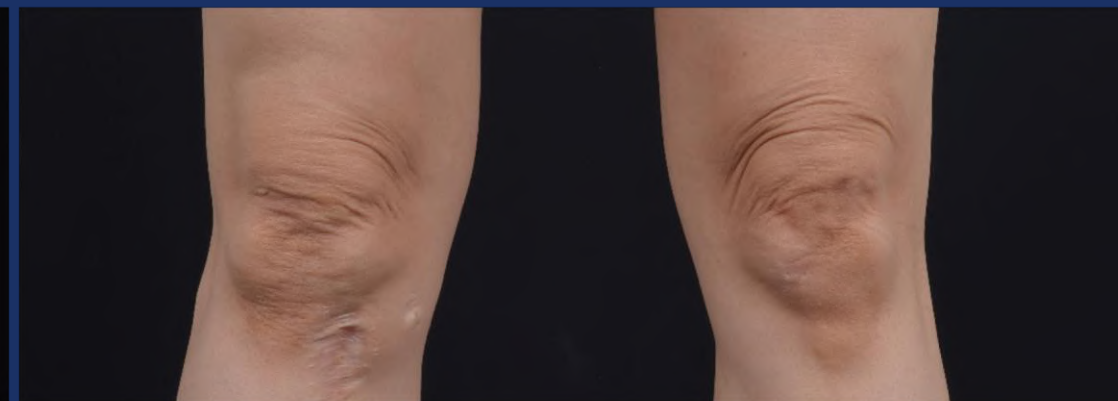

2週間後 (3セッション)



治療前



2週間後(4sessions)

ULTRAFORMER MPT

ULTRAFORMER MPT

「Ultraformerは世界中で多くのクリニックが導入している信頼性のある機器です」

**臨床的にも効果と安全性が
証明されています**

